


MULTI-POINT P-STIM

P - S T I M 

e **MULTI-POINT**

Estimulação de pontos cutâneos no tratamento da dor com total mobilidade para o paciente.

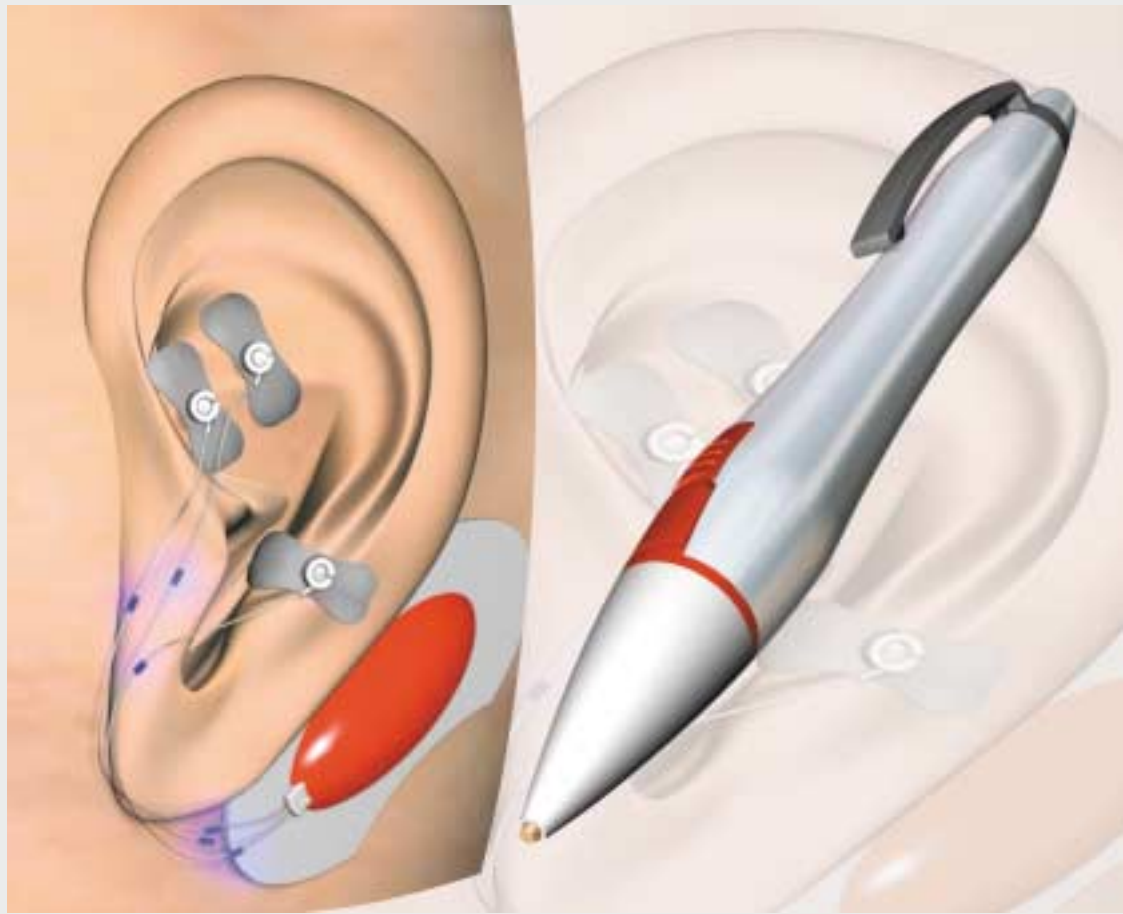


Karl Ritter von Ghega –
Prêmio de melhor inovação Austríaco 2002

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK




Pino multifuncional **MULTI-POINT** para localizar e aplicar.

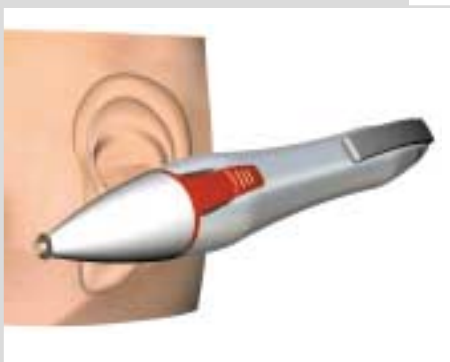

O pino para localizar e aplicar seleciona um emplastro de localização.



Os pontos de acupuntura são localizados e marcados.

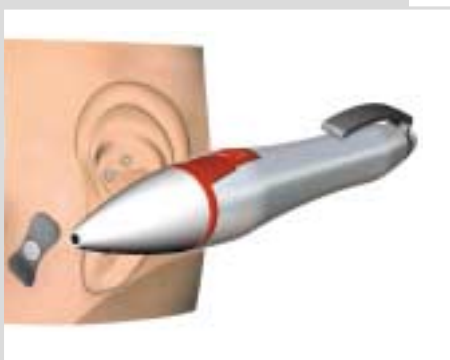

As agulhas de estimulação são selecionadas, de forma segura, pelo **MULTI-POINT**.

Estimulação de pontos cutâneos – Uma alternativa para o tratamento da dor

O tratamento da dor e em particular o tratamento de dores crônicas, continua sendo um dos maiores desafios que a medicina atual tem enfrentado. Com a rejeição, por um número crescente de pacientes, de tratamentos médicos devido a possíveis efeitos colaterais e à interferência em um padrão normal de vida, métodos alternativos de tratamento têm desfrutado de profundo interesse. Uma opção é a estimulação auricular, isto é, estimulação aplicada na orelha.

A acupuntura têm sido praticada na Ásia por milhares de anos e constitui um componente significativo de medicina neste continente. Sua eficácia tem sido comprovada por métodos cientificamente aprovados pela medicina ocidental, de tal forma que hoje em dia a acupuntura tem aprovação mundial.

Outra evolução da acupuntura consiste da acupuntura eletrônica ou estimulação de pontos cutâneos, através da qual pulsos elétricos são aplicados por meio de agulhas de acupuntura. É a combinação dos benefícios da acupuntura tradicional com os da medicina moderna ocidental com base na eletricidade. Sua eficácia no tratamento da dor tem sido comprovada por pesquisas científicas e não há indicação de efeitos colaterais.

A estimulação de pontos cutâneos tem sido praticada com sucesso no tratamento da dor por muitos anos, obtendo-se melhores resultados do que com a prática da acupuntura tradicional em muitas áreas.

P - S T I M :

Mobilidade e conforto graças à miniaturização

Conventional Aparelhos convencionais montados em bancadas destinados à acupuntura eletrônica são acessórios utilizados na prática da medicina em clínicas onde o tratamento é realizado. Este sistema demanda muito tempo e esforço, particularmente por parte de pacientes com dores crônicas.

O P-STIM é um acessório em miniatura que não só fornece a estimulação de pontos cutâneos na orelha durante um período de até quatro dias, como também garante que o paciente usufrua de total mobilidade e de grande bem-estar durante sua utilização. As especificações técnicas do P-STIM estabelecem novos padrões para a acupuntura eletrônica: O que era compactado em grandes aparelhos montados em bancadas, agora pode ser acondicionado em uma área cujas dimensões não são superiores a 63x32x7 mm (CxLxA). A unidade de estimulação completa pesa apenas 7g.

A miniaturização possibilitou a combinação da aplicação de estimulação durante um período prolongado de mais de quatro dias à total mobilidade

do paciente. Após a aplicação, não são necessárias outras visitas ao médico ou ao acupunturista durante todo o período do tratamento. Durante tal período, o paciente poderá seguir sua rotina normal e desfrutar de um melhor padrão de vida. O P-STIM é extremamente agradável de se usar. Seu pequeno tamanho, peso leve, de apenas 7 g, e aplicação direta atrás da orelha, significam que ele é quase não é percebido pelo paciente..

MULTI-POINT:

Um pino multifuncional para localizar-e-aplicar

MULTI-POINT é um pino de localização e aplicação, projetado para realizar todas as principais etapas de aplicação do P-STIM:

- Localiza os pontos corretos de acupuntura.
- Um sinal visual e sonoro é emitido quando um ponto é encontrado.
- Aplica emplastos na posição correta para marcar os pontos.
- Seleciona de forma segura as agulhas de acupuntura e emplastos de fixação.
- Fixa as agulhas no lugar correto.

Portanto, o MULTI-POINT realiza muito mais funções do que os pinos de localização convencionais. O MULTI-POINT foi especialmente desenvolvido para a aplicação do P-STIM, porém também pode ser utilizado de forma independente.

Fácil de Usar


O P-STIM é extremamente fácil de aplicar. O procedimento completo não leva mais do que cinco minutos:

Primeiramente, o usuário limpa a orelha para a aplicação da acupuntura.

Em seguida, utiliza o MULTI-POINT para localizar os pontos corretos de acupuntura. Estes pontos são facilmente encontrados na pele por um medidor de impedância que é integrado ao pino de localização e que emite um sinal visual e sonoro. Um emplastro para localização que teria sido anteriormente selecionado pelo pino é em seguida aplicado para marcar o local.

Girando o pino de localização 90 graus permite que ele se torne um pino de aplicação, o qual, de forma segura, seleciona as agulhas e os emplastos de fixação, os quais são em seguida aplicados nos lugares marcados anteriormente através de um acionador de pressão.

Agora o usuário fixa a unidade de estimulação atrás da orelha utilizando um eletrodo terra, e conecta os condutores do acessório às agulhas através de uma simples pressão no plugue plástico condutor da corrente elétrica. O P-STIM é acionado ao retirar-se a película protetora da bateria e ajustar-se com um clique a cobertura do acessório.

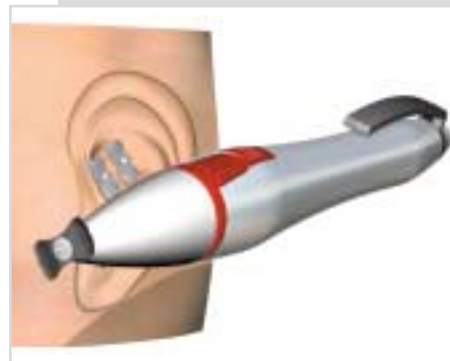

As agulhas são fixadas no local correto através de um acionador de pressão.



A unidade de estimulação **P - STIM** é fixada atrás da orelha através de um eletrodo aderente.



O **P - STIM** é conectado às agulhas de estimulação.



8) Contínua estimulação de pontos cutâneos por um período de até quatro dias.

Qualidade e Segurança

A BIEGLER Medizinelektronik GmbH tem obtido sucesso em seu compromisso com o desenvolvimento e produção de equipamentos médicos há mais de 25 anos. Um sistema administrativo de qualidade, que observa os padrões EN ISO 9001 / EN 46001, rege não somente as atividades de pesquisa e desenvolvimento da empresa como também a produção, controle de qualidade e medidas de inspeção de segurança.

A segurança na utilização do **P-STIM** e do **MULTI-POINT**, bem como o cumprimento de regulamentos estatutários são comprovados pelo símbolo CE.

Uma rápida verificação de todos os pontos principais:

- Estimulação de pontos cutâneos – uma alternativa no tratamento da dor
- Pacientes desfrutam de total mobilidade durante um período de mais de quatro dias de tratamento
- Grande bem-estar graças à miniaturização
- Uso multifuncional do pino para localizar e aplicar
- Utilização fácil e segura

Informações

Nossos vendedores terão o prazer lhes fornecer informações pessoalmente. Eles também poderão ser contatados para a obtenção de informações impressas; por exemplo, estudos científicos. Para uma visão geral dos materiais disponíveis, visite o nosso website:

www.biegler.com

A utilização do **P-STIM** e do **MULTI-POINT** é demonstrada de forma satisfatória através de uma animação em CD-ROM, disponibilizada mediante solicitação



Item para o pedido:	No. do Pedido	Unidades por pacote
P-STIM (conjunto completo para 1 aplicação)	PC 100 EN 01	1
P-STIM (conjunto completo para 1 aplicação)	PC 100 EN 10	10
MULTI-POINT (pino para localizar e aplicar)	LG 300 EN 01	1
Emplastros de localização (descartáveis)	FE 405 0053	90
Agulhas e emplastos de fixação (descartáveis)	FE 405 0052	45

Fabricante:

BIEGLER Medizinelektronik
Allhangstraße 18a
A-3001 Mauerbach
Tel.: +43 - 1 979 21 05
Fax: +43 - 1 979 21 05 16
Email: office@biegler.com
Internet: www.biegler.com

Distribuição:

Boeckle Enterprises Representação Comercial, Ltda
Rua São José, 40
2º andar
Centro, Rio de Janeiro
RJ CEP 20010-020
ph: (55) 21-3231-9019
fax: (55) 21-3231-9028
P-Stim@berce-learning.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK